

電池を入れる 交換する

(つづき)

お願い

●充電式の電池を使用しない。

▶公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障の原因になります。必ず指定の電池(単4形アルカリ乾電池)を使用してください。

●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない。

●マンガン乾電池を使用しない。

▶液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本器の故障、けがなどの原因になります。

●電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。

▶間違えると故障するおそれがあります。

お知らせ

●使用済み電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

- センサーキャップを引き上げると、最初にセンサー使用回数が表示されます。
- 購入後1年経過または、センサー使用回数が2499回になった場合のどちらか早い方がセンサー寿命です。
- 測定結果が表示されるとセンサー使用回数が1回カウントされます。



●センサー使用回数が2499回になると電源が自動OFFしてご使用できなくなります。継続してご使用いただく場合は新規購入してください。

A diagram of a vertical container, possibly a hopper or silo, with an upward-pointing arrow on its side and three small circles arranged horizontally in the center.

Warm 10

4. ピツと音がし、表示部に「START」が表示され。

「06→05→...→01」とカウントします。

5.STARTが表示されカウントダウン中に吹きかけ口から1cm程度離して約4~5秒間息をフ〜ッと吹きかける。
ピーと音がしたら、測定完了です。

● 連続でご使用の際は、直前の成分が残っている場合があります。
START前に製品を数回振ってからご使用ください。

6. ピツと音がして測定結果と換気お知らせサインが約4秒間表示される。

数値が0.00mg/L ~ 0.24mg/L グリーンランプ点灯します。

数値が0.25mg/L ~ 0.39mg/L オレンジランプ点灯します。

数値が0.4mg/L ~ 0.95mg/L レッドランプ点灯します。

警告

●本器は飲酒の可否を判定するものではありません。
自動車等の運転、機械操作及び危険を伴う作業をするための判断には絶対に使用しないでください。

現象	ご確認ください
測定結果が高めに 出る	●口の中にアルコール成分が残っていませんか？ ▶うがいをして再度はかってください。 ●飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後にはかかっていませんか？ ▶飲食後20分以上経過してからのはかってください。 ▶うがいをして再度はかってください。 ●本器に強いにおいがしみついていませんか？ ▶本器を数回振ってにおいを取り除いてください。 ●においがある場所ではかかっていませんか？ ▶場所を変えてはかってください。
測定結果が低めに 出る	●約4～5秒間、きちんと息を吹きかけましたか？ ▶息を吹きかける時は、約4～5秒間しっかりと吹きかけてください。

現象	ご確認ください
測定結果が低めに 出る	●風のある場所ではかって いませんか？ ▶場所を変えてはかって ください。
測定結果が一致 しない	●風のある場所ではかって いませんか？ ▶場所を変えてはかって ください。 ●においがある場所では かっていませんか？ ▶場所を変えてはかって ください。 ●口の中にアルコール成分 が残っていませんか？ ▶うがいをして再度は かってください。 ●飲食直後、喫煙、オーラ ルケア用品使用後には かっていませんか？ ▶飲食後20分以上経過 してからはかってくだ さい。 ▶うがいをして再度は かってください。

現象	ご確認ください
が表示される	「SENSOR」 ● センサー使用回数が2499回になっていませんか？ ▶ センサー使用回数が2499回になると電源が自動OFFしてご使用できなくなります。 継続してご使用いただく場合は、新規購入してください。

検 査 方 式	半導体式ガスセンサー
セ ン サ ー 寿 命	購入後1年以内または、センサー 使用回数2498回以内
呼気中アル コール濃度 測定範囲	0.00～0.95mg/L 0.0mg/L単位 (0.01mg/L未満は「0.00mg/L表示」)
セ ン サ ー 使 用 回 数 表 示	2498回 2499回は「SENSOR」
電 源	単4形アルカリ乾電池 ×2本
使用温度範囲	5～35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0～40℃(結露なきこと)
寸 法	約幅32×高さ105×奥行16mm
質 量	約32g(乾電池含まず)
主 な 材 質	ABS
生 産 国	中国
付 属 品	取扱説明書(本書)

※デザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

創設者代表 **イスケイジャパン株式会社**
 (ご相談窓口) 〒818-0083 福岡県東区基町2-10-0
 TEL:092-62-4211 FAX:092-624212
 福岡市中央区 中区12番一丁目11号 中島ビル1101号 TEL:092-624212