

取扱説明書

保証書付

ALCOHOL CHECKER
SKJ-AL001JP

※本書に記載されている
イラストはイメージ図です。



保証書

販売店様へ
ご購入時に、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様
欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことを約束する
ものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生し
た場合は、本書をご提示のうえ、ご相談窓口にて修理をご依頼
ください。

※お客様の個人情報、修理完了品の発送にのみ使用させていた
だきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れる
ことのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品番	SKJ-AL001JP
保証期間	購入後6か月以内または、センサー 使用回数2499回以内
お買い上げ日	年 月 日
ご住所〒	
お客様 お名前	様
お電話	()
販売店 店名・所在地	
電話	()

使用目的に関するご注意

警告

道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒
気を帯びて車両等を運転してはならない。」と
遵守事項が定められています。本器の測定デー
タは飲酒の有無を判断するための一つの判
断材料であって、運転の可否を判断するもの
ではありません。測定結果に基づいて、車両
の運転や機器の操作などを行って良いか否か
の判断に対して、本器の製造者、および販売に
携わる関係者は一切責任を負いません。

■センサー寿命

本器はセンサーの特性
上、購入後1年以上経過
または、センサー使用回
数が2500回以上にな
ると精度を保証できな
くなります。継続してご使
用いただく場合は、新規
購入してください。

1. センサー使用回数が 2500回以上になった場合

センサー寿命をお知らせするため、センサー
使用回数2500回以上になると「SENSOR」
※測定結果がきちんと表示された測定の回
数を自動的にカウントします。
※測定を途中で中止したり、「Err」が出た場合
はカウントされません。

2. 購入後1年を経過した場合

センサー使用回数に関わらずセンサーの精
度は時間とともに低下します。
※この場合は、「SENSOR」マークは表示さ
れませんのでご注意ください。

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危
害、財産への損害を未然に防止するため、
お守りいただきたいことを次のように説明
しています。本文をよくお読みいただき、
安全に正しくお使いください。

警告

この表示の欄は「死亡また
は重傷を負うおそれのあ
る」内容です。

注意

この表示の欄は「損害を負
うおそれまたは物的損害が
発生するおそれのある」内
容です。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず守っていただく内容です。

お願い

本器を最良の状態を保つ
ために守っていただきたい
内容です。

お知らせ

本器の使用・点検に関連し
て、お客様に知っていただ
きたい補足事項です。

注意

- 本器を子どもの手
の届く場所に置か
ない。
- ▶故障やけがをする
おそれがあります。
- 電池は火中に投じない。
- ▶破裂してけがをするおそれあ
ります。
- 本器を業務用として使用しない。
- 充電式の電池を使用しない。
- ▶公称電圧が1.2V以下の充電式
電池は本器の動作に必要な電圧
が得られないため、誤動作や故
障の原因になります。
必ず指定の電池（単4形アルカリ
乾電池）を使用してください。
- 新しい電池と古い電池、種類の
違う電池を同時に使用しない。
- マンガン乾電池を使用しない。
- ▶液漏れや発熱、破裂のおそれ
があり、本器の故障、けがなどの原
因になります。



本器は精密に作られております。故障・誤動
作測定の精度低下を防ぐため、次のことを守っ
てご使用ください。

■取り扱いについて

注意

- 本器の分解や水洗いは絶対
に行わない。
- ▶故障するおそれがあります。
- 過度の衝撃や振動を与えな
い。
- ▶故障するおそれがあります。
- 10℃以上の温度差がある場
所に移動させた場合、2時間
以上放置してから使用する。
- ▶正しい測定ができないうそ
れがあります。



■保管について

注意

- 保管の際は、センサーキャップ
を閉めて保管する。
なるべくチャック付きポリ袋に
入れることをお勧めします。
- ▶次のようなところには絶対に
保管しないてください。
- ・芳香剤、たばこ、スプレー
等、強いにおいのするところ。
- ・直射日光の当たるところ。
- ・暖房器具に近いところ。
- ・温度や湿度の変化が大き
いところ。
- ・保管温度範囲外のところ。
（車内などは温度が高くなり
また、寒冷地では温度が
低くなりますので絶対に
放置しないでください。）
- ・湿度が高く、水のかかる
ところ。
- ・ほこりが発生しやすいと
ころ。
- ・アルコール類に近いと
ころ。



必ず守る

安全上のご注意 (つづき)

■お手入れについて

注意

- 本器の汚れは水で湿らせ固く
絞った柔らかな布で拭く。
- ▶清掃に熱湯や洗剤、ベンジ
ン、シンナー等のご使用しな
いください。
- ▶センサーに悪影響を及ぼす
おそれがあります。



必ず守る

警告

- 車両の運転や機械操作の最中に
測定を行わない。
- ▶注意が散漫になり、思わぬ事
故を起こすおそれがあります。
- ▶自動車等の運転中に本器を
使用したこと起因する事故
の責任に対して本器の製造者
および販売に携わる関係者は
一切の責任を負いません。



禁止

注意

- 唾液や水などがセンサー内部
に入らないようにする。
- ▶故障するおそれがあります。



禁止

■測定上の注意


注意

- 食事、喫煙、オーラルケア用品
を使用した直後に測定しない。
- ▶本器は呼気中のアルコール
濃度を測定するためお酒を
飲んでいなくても、アルコー
ル成分を含んだものや強い
においを含んでいるものを
口にした後、センサーが反
応することがあります。
（例：たばこ、オーラルケア
用品など）
うがいをするもしくは20分
以上経過してから、はかって
ください。




必ず守る

各部の名称/付属品

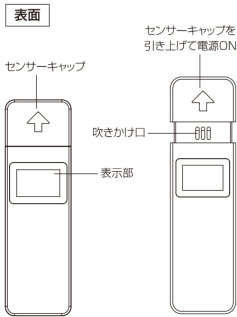

裏面

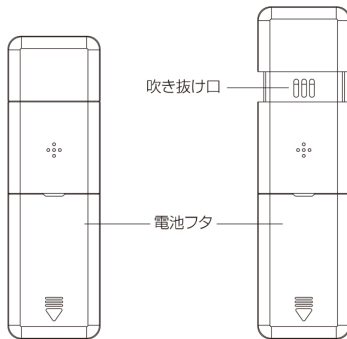

付属品の確認

☑取扱説明書保証書付（本書）

各部の名称/付属品 (つづき)



電池を入れる・交換する

1. 本器裏面の電
池フタをはず
す。
電池フタをス
ライドさせて
はします。
2. 電池の極性
（⊕⊖）を間違
えないように
注意して、電池
（単4形アルカ
リ乾電池）を入
れる。
3. 電池フタを取
り付ける。
「カチッ」と音が
するまで押し込
んでください。

電池が消耗すると表示部に「Lo」が表示され
ます。速やかに新しい単4形アルカリ乾電池
2本と交換してください。必ず2本同時に交換
してください。

電池を入れる 交換する (つづき)

お願い

- 充電式の電池を使用しない。
- ▶公称電圧が1.2V以下の充
電式電池は、本器の動作に必
要な電圧が得られないため、誤
動作や故障の原因になります。
必ず指定の電池（単4形アルカ
リ乾電池）を使用してください。
- 新しい電池と古い電池、種類
の違う電池を同時に使用しない。
- マンガン乾電池を使用しない。
- ▶液漏れや発熱、破裂のおそれ
があり、本器の故障、けがな
どの原因になります。



禁止



必ず守る


お知らせ

- 使用済み電池はお住まいの市町村区の廃棄
方法に従って処理してください。

測定前クリーニング

正しく測定していただくため、ご使用前に測定前クリーニングを行ってください。
特に初めてご使用いただく場合や、長期間保管後にお使いいただく場合には、5回程度センサーの測定前クリーニングを行ってください。

●測定前クリーニング開始

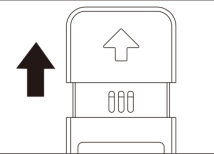


1.センサーキャップを引き上げて電源をONする。



2.ピッと音がしてセンサー使用回数が表示される。
※出荷前検査のためカウントが上がっている場合があります。

測定前クリーニング (つづき)

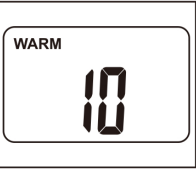

3.「WARM」と表示され。
「10→9→…1→0」とカウントダウンします。



4.ピッと音がして、「START」が表示され。
「6→5→…1→0」とカウントします。
息を吹きかけず、そのまま待つ。



5.「Err」が点滅する。
電源が切れたら測定前クリーニング完了です。
センサーキャップを閉じてください。

●測定結果



6.ピッと音がして測定結果と換気お知らせサインが約4秒間表示される。

- センサーキャップを引き上げると、最初にセンサー使用回数が表示されます。
- 購入後1年経過または、センサー使用回数が2500回以上になった場合のどちらか早い方がセンサー寿命です。
- 測定結果が表示されるとセンサー使用回数が1回カウントされます。
測定を途中で中止したり、測定エラーが出た場合はカウントされません。




1. センサー使用回数が2500回以上になると「SENSOR」

お知らせ

- センサー使用回数が2500回以上になると精度を保証できなくなります。継続してご使用いただく場合は新規購入してください。

●測定する

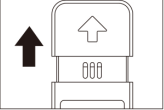

1.センサーキャップを引き上げて電源をONする。



2.ピッと音がし、表示部にセンサー使用回数が表示される。
※出荷前検査のためカウントが上がっている場合があります。




3.「WARM」と表示され。
「10→9→…1→0」とカウントダウンします。

●測定開始



4.ピッと音がし、表示部に「START」が表示され。
「6→5→…1→0」とカウントします。

測定する (つづき)

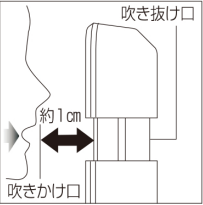

5.STARTが表示中に吹きかけ口から1cm程度離して約4～5秒間息をフッと吹きかける。
ピーと音がしたら、測定完了です。

お知らせ

- ビビビと音がし、「Err」が点滅した場合は測定エラーです。
以下の場合には、測定エラーとなりますことがあります。



- ▶「START」が表示されてから約6秒以内に息を吹きかけていない。
- ▶吹きかけが不足している。
- ▶吹きかけを途中でやめる。
- ▶吹きかけ口および吹き抜け口を指でふさいでいる。
- 測定エラーの場合、センサー使用回数はカウントされません。

お知らせ

数値が0.00mg/L ~ 0.25mg/L グリーンランプ点灯します。

数値が0.26mg/L ~ 0.39mg/L オレンジランプ点灯します。

数値が0.4mg/L ~ 0.95mg/L レッドランプ点灯します。

測定する

⚠警告



必ず守る

- 本器は飲酒の可否を判定するものではありません。
自動車等の運転、機械操作及び危険を伴う作業をするための判断には絶対に使用しないでください。

故障かな？

現象	ご確認ください
測定結果が高めに出る	●口の中にアルコール成分が残っていませんか？ ▶うがいをして再度はかってください。
	●飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後にはかかっていませんか？ ▶飲食後20分以上経過してからをはかってください。
測定結果が低めに出る	▶うがいをして再度はかってください。
	●本器に強いにおいがしみついていますか？ ▶本器を数回振ってにおいを取り除いてください。
測定結果が一致しない	●においがある場所ではかかっていませんか？ ▶場所を変えてはかってください。
	●約4～5秒間、きちんと息を吹きかけましたか？ ▶息を吹きかける時は、約4～5秒間しっかりと吹きかけてください。

故障かな？ (つづき)

現象	ご確認ください
測定結果が低めに出る	●風のある場所ではかかっていませんか？ ▶場所を変えてはかってください。
	●風のある場所ではかかっていませんか？ ▶場所を変えてはかってください。
測定結果が一致しない	●においがある場所ではかかっていませんか？ ▶場所を変えてはかってください。
	●口の中にアルコール成分が残っていませんか？ ▶うがいをして再度はかってください。
測定結果が一致しない	●飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後にはかかっていませんか？ ▶飲食後20分以上経過してからをはかってください。
	▶うがいをして再度はかってください。

故障かな？ (つづき)

現象	ご確認ください
Errが表示される	●「START」表示してから6秒以内に吹きかけましたか？ ▶「START」表示してから6秒以内に吹きかけてください。 ※測定前クリーニング終了時に表示される「Err」は異常ではありません。
	「SENSOR」 ●センサー使用回数が2500回以上になっていませんか？ ▶センサー使用回数が2500回以上になると精度保証できなくなります。継続してご使用いただく場合は、新規購入してください。
SENSOR 2499が表示される	

仕様

検知方式	半導体式ガスセンサー
センサー寿命	購入後1年以内または、センサー使用回数2499回以内
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00～0.95mg/L 0.01mg/L単位 (0.01mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー使用回数表示	2499回 2500回以上は「SENSOR」
電源	単4形アルカリ乾電池 ×2本
使用温度範囲	5～35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0～40℃(結露なきこと)
寸法	約 幅32×高さ105×奥行16mm
質量	約 32g(乾電池含まず)
主な材質	ABS
生産国	中国
付属品	取扱説明書(本書)

※デザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

エスケーパル株式会社
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
TEL:03-5561-1111 FAX:03-5561-1112